

ポリカ製フェイスシールド^(※1)

松田硝子工業株式会社
埼玉県さいたま市岩槻区釣上新田 1047
TEL 048-798-1511

| パーツ | 材質 |
|--------|----------------|
| シールド本体 | ポリカーボネート 0.3mm |
| 額当て | ポリカーボネート 0.5mm |
| 調整ゴム | - |
| プラホック | PE(ポリエチレン) |



・優れた透視性

国内大手メーカーのポリカーボネートを使用

・優れた耐熱性

ポリカだから熱湯消毒して再利用できる (※2)

・高品質ゴム使用

後頭部のフィット感が良い

ゴムがズレにくい、ねじれない

・簡単に組み立てられる

ゴム紐を通して、プラホックでパチパチ留めるだけ


※1 ポリカ(ポリカーボネート)は衝撃・熱に強い反面、比較的薬品に弱いと言われていますが、アルコールで表面をサッと拭く程度なら問題ありません

※2 プラホックは PE(ポリエチレン)製となっています
フェイスシールド全体は 94℃の熱湯に1分間漬けても変形しませんでした

1 梱包 50 枚入での販売となります



<フェイスシールド セット内容>

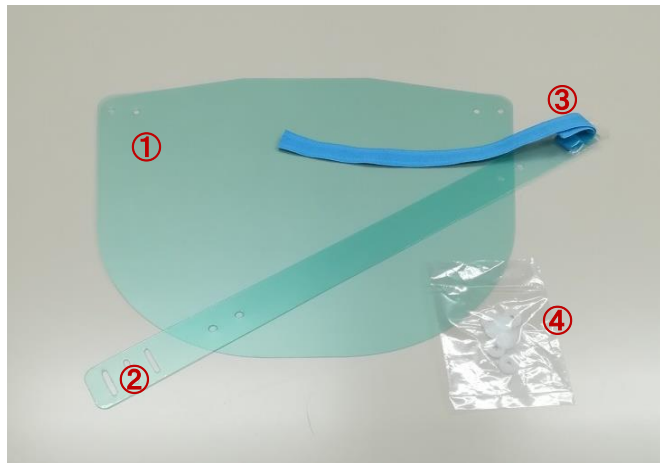

MG-I
Matsuda Glass Industry


松田硝子工業株式会社
さいたま市岩槻区釣上新田1047
Tel : 048-798-1511

- ①シールド本体 1枚
- ②額当て 1本
- ③調整ゴム 1本
- ④プラホック オス(突起あり)・メス 4セット

※ シールド本体と額当てには、表裏に保護フィルムが貼ってあります。どちらも保護フィルムを剥がして組立ててください。

<手順1>

額当てに調整ゴムを取り付けます。

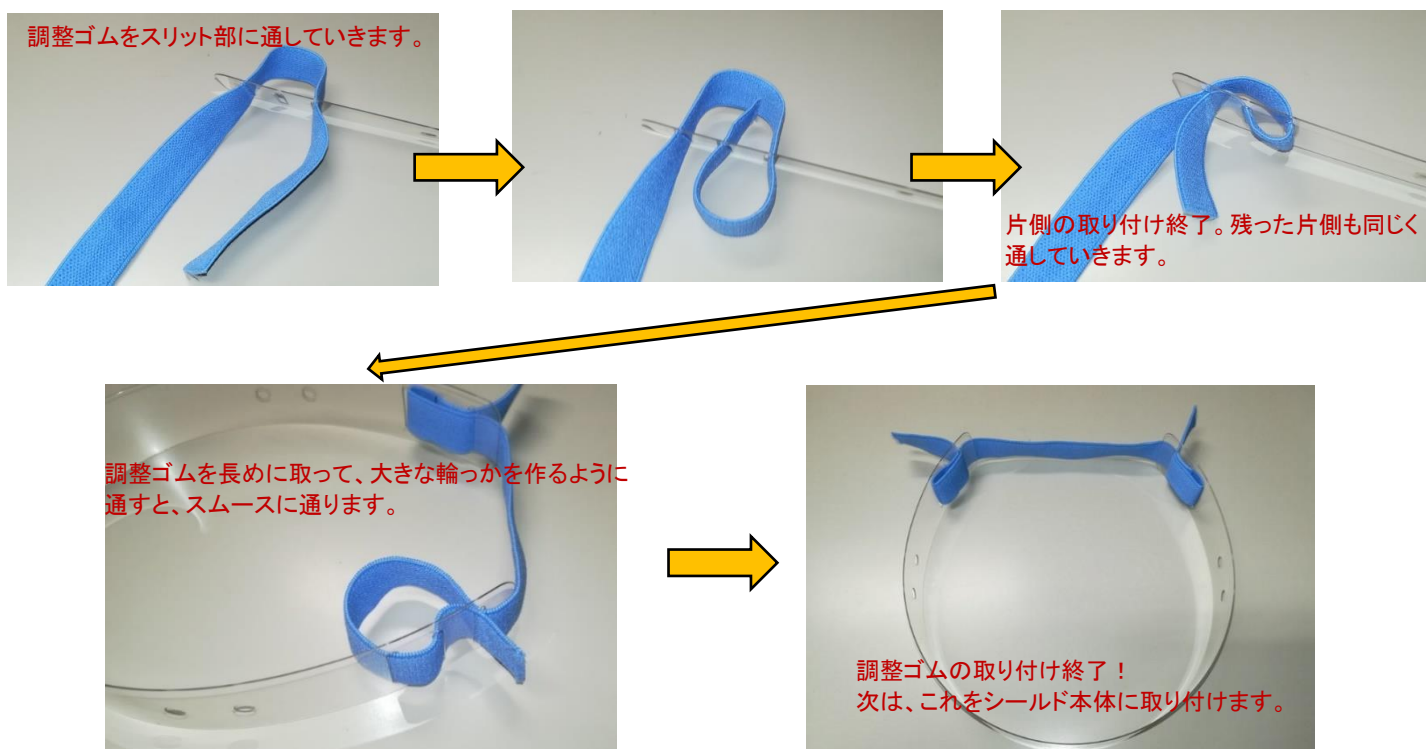

(※調整ゴムは、額当ての片側だけ取り付けられた状態で出荷しています。残った片側を、左右対称となるように取り付けてください)

<手順2>

プラホック(オス・突起あり)を内側から差し込み、シールド本体と重ね合わせたら、プラホック(メス)で固定します。4カ所全て固定したら完成です。

